



<http://www.unisis.co.jp>

UNIEVER[®]

Uniever is a brand name of Unisis Corp.

ディスポーザブル外科用穿刺針 DISPOSABLE ANGIOGRAPHIC NEEDLE



ワンピース針
20G×60mm
(B針基)

ワンピース針
18G×70mm
(F針基Bハネ)

ツーピース針

 **UNISIS CORP. JAPAN**

薬事認証番号 224AFBZX00040000

外科用穿刺針

切れ味と使いやすさに、技術と高精度が光る穿刺針

セルジंगाー法において使用される、血管造影用針です。


刃面の微細な加工によりスムーズなガイドワイヤの通過が特徴です。

用途に合わせて、シンプルなワンピースタイプと金属の外針をもつツーピースタイプを用意しております。

シンボルマーク



ランセットポイント

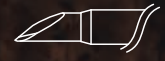

トリベベルポイント

特徴


●用途に合わせた構造

針基は透明なポリカーボネートを使用しております。

針基の保持とルアー内部が視認しやすいデザインを採用し、血液のリコールやガイドワイヤの確認が容易です。


針基には取り外しが可能な羽根が付属しております。

術者の手技に合わせて装着が可能です。

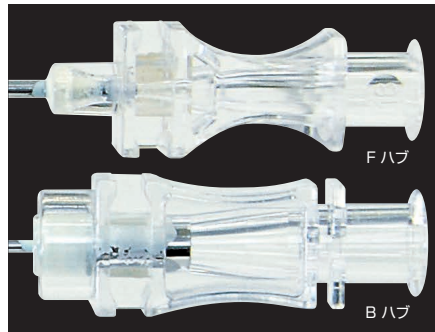

●刃面部処理(アゴ処理)


針先のアゴ(ヒール部)は、特殊なブラスト処理により刃を鈍化処理を施しております。これにより、ガイドワイヤの切断・断裂を局限すると同時にスムーズな挿入を実現しました。

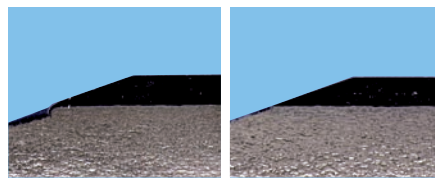


●肉薄

当社独自の肉薄チューブを採用したことにより造影針に求められる柔軟性と操作性を実現しました。


このため、針基の設計と相まって、患部に対する挿入が容易に行えます。

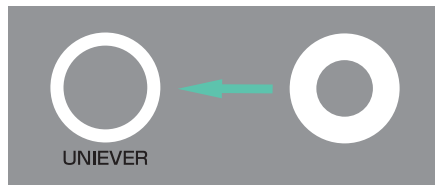

針先形状

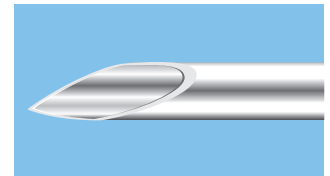


ワンピース針(ランセットポイント)
シンプルなランセットポイントタイプの穿刺針です。
良好な穿刺特性をもっております。

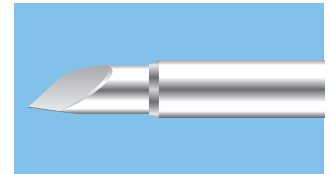

ツーピース針(トリベベルポイント)
外針はラウンテッドポイントとし、スタイレットは鋭利なトリベベルポイントです。
スタイレットと、外套の段差は精密な加工で最小の抵抗になるべく注意深く加工されております。

各部名称および略図

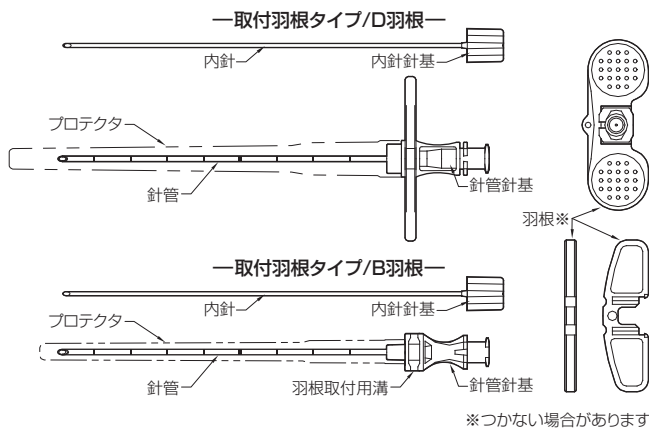

標準提供サイズ

【製品名称】 外科用穿刺針

G:ゲージ カラーコード	長さ	製品コード
17G	70mm	3021770
18G	70mm	3021870
19G	70mm	3021970
20G	50mm	3022050

包装・出荷単位：25本/箱・4箱/ケース

販売名：UNIEVER イントロデューサ針

E.O.G.滅菌済み

※上記標準品以外のご要望は、営業担当までお問合せ下さい

薬事認証番号 224AFBZX00040000

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F
国内営業部 Tel:03-5812-7768 Fax:03-5812-7769

ユニスウェブサイト <http://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 **ユニス** 埼玉工場

代理店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

AG120102J