




小動物用

<https://www.unisis.co.jp>

ディスポーザブル 動物用涙管洗浄針

DISPOSABLE VETERINARY LACRIMAL CANNULA

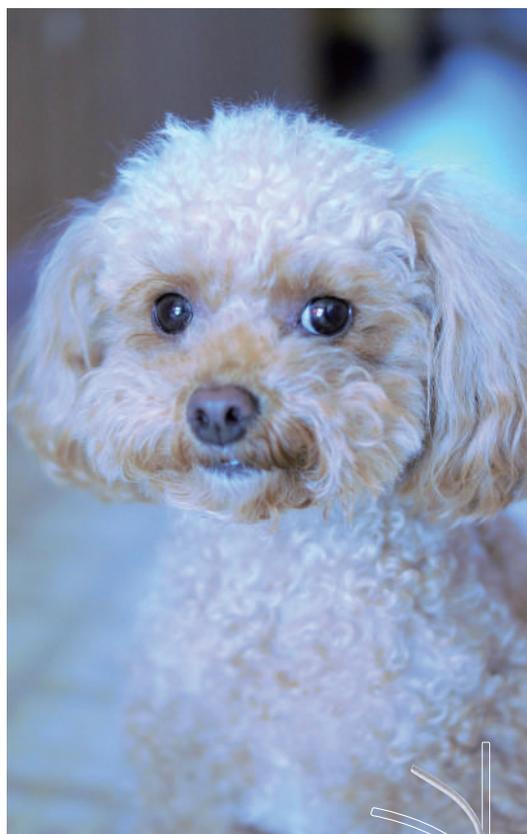


フレキシブルな素管



25G×20mm

ディスプレイザブル動物用涙管洗浄針

ポイントマーク

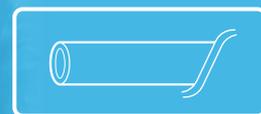


ブラントポイント

製品名称 動物用涙管洗浄針

用途 鼻涙管の洗浄。鼻涙管の狭窄や閉塞の改善に用いる。


軟性ステンレス製の針管

通常の針管より軟らかい仕様のため、針管を指で簡単に湾曲することが可能です。また、患畜が急に動いた場合でも、軟らかい針管が負荷荷重を分散するため、破断する心配がより少なく、安心してご使用いただけます。

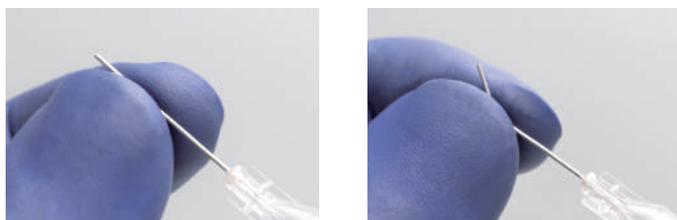

【軟性イメージ】


一般的な針と本製品に同じ力(軽い力)をかけた際のイメージです。

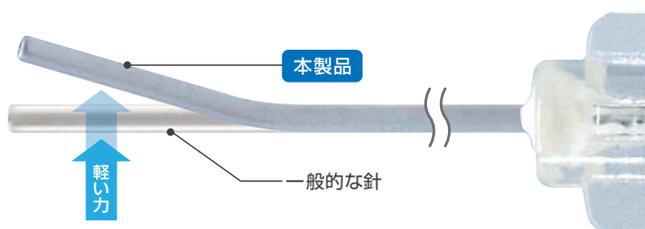

※過度に曲げたり、反復して曲げると破損の原因になりますのでご注意ください。


ブラントポイントの針先

針挿入時の患部への侵襲低減とともに挿入し易さに配慮し、針管先端に丸め加工を施しています。

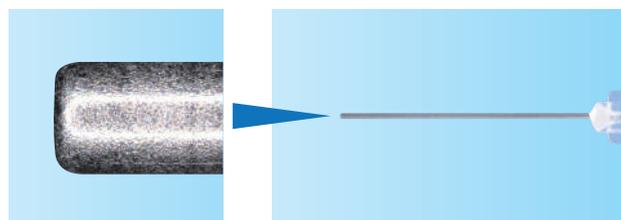


機能性に配慮した針基

ポリカーボネート製の針基は透明性が高く、薬液等が容易に視認できます。また、手技の際に鼻涙管の入口を隠すことがないようにコンパクトな設計としました。

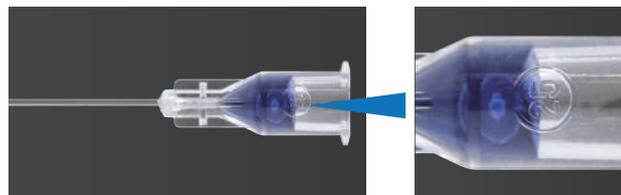

※染色あり

各部名称および略図

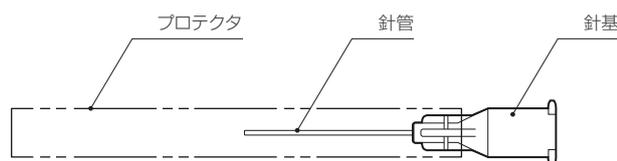

標準提供サイズ

ゲージ	長さ	製品コード
25G	20mm	A0026600

・包装・出荷単位：10本/箱

・販売名：動物用涙管洗浄針

・E.O.G.滅菌済

・動物用一般医療機器

※上記標準品以外のご要望は、営業担当までお問合せ下さい。

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F
国内営業部 Tel:03-5812-8830 Fax:03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <https://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

AM210702J
2021年5月