

バイトブロック取扱説明書


タイプ：(シリコン)L
(シリコン)S
(ポリエチレン)L

本品は気管内挿管時の挿管チューブと併用するディスプレイザブル・バイトブロックです。

使用方法

1. 施設のプロトコルに従って挿管チューブを挿入します。
2. 挿管チューブに沿わせて図中矢印の向きに本体を挿入します。
3. 上下フランジのうちAが上顎歯、Bが下顎歯側になるよう本体を固定します。

注) 上記3は一般的ななかみ合わせ構造の場合です。すべての患者様に推奨されるものとは限りません。

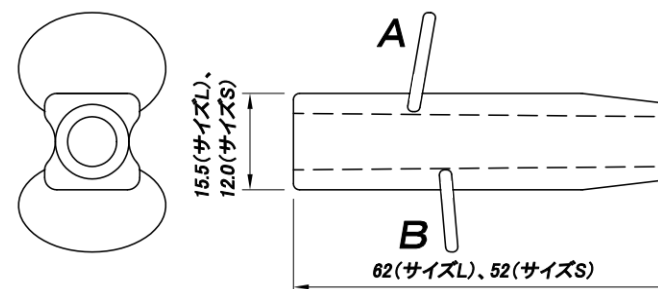

材質：シリコンゴム又はポリエチレン
滅菌：EOG 製造国：日本

使用上の注意・警告

- バイトブロックは一人患者用、再使用禁止です。再使用した場合、感染を引き起こす可能性があります。
- 本品は潰瘍等の低減を保証するものではありません。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品であり生命維持を目的とした製品ではありません。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品でありチューブ固定、チューブ保護の確実性を保証するものではありません。
- 専門の医師がご使用ください。使用目的以外に使用しないでください。
- 固定テープでしっかりと挿管チューブを固定して使用してください。なお、シリコンタイプについては、材質上テープがはがれやすく固定しにくい場合があります。より強い固定力(確実な固定を保証するものではありません)が必要な場合には、本取扱説明書下部に記載の連絡先までお問い合わせください。
- 異常が早期に発見できるよう常に監視してください。
- バイトブロック表面に損傷等異常が認められる場合は直ちに新しいものと交換してください。
- パッケージや本体に破れ、破損等異常が認められる場合には使用しないでください。
- 挿管に関しては院内のプロトコルに従ってください。二次的な加工はしないでください。
- 雑菌の増殖が考えられますので院内の手順に従って定期的に交換してください。

* 株式会社ユニシス TEL:03-5812-7768
製造販売元:株式会社ユニシス埼玉工場
開発元:株式会社キュアケア